



Comfort

CareBag
Sacs absorbants

Protocol

Comfort urinaalzakhouder (20722) t.b.v. mannen wegwerp urinaal

Definitie	Het CareBag® mannen wegwerp urinaal (URI) is een disposable opvangzak voor de opvang van urine voorzien van een (geur)absorberende inlegger (450 ml). Het maakt de opvang, het transport en het afvoeren van urine veilig en hygiënisch. De Comfort urinaalzakhouder is een medisch hulpmiddel om het hanteren van de URI zak te vereenvoudigen.
Informatie Wanneer gebruikt u de mannen wegwerp urinaal met de houder?	Voor alle patiënten die urinalen of urinaalzakken gebruiken, met name voor de volgende doelgroepen: - Patiënten die niet in staat zijn naar het toilet te gaan, of gebruik maken van een urinaal. - Patiënten die een katheter gebruiken voor het aftappen (van de urine dagzak). - Patiënten die een stoma hebben en deze tussentijds willen aftappen. - Patiënten met een BRMO: MRSA, ESBL. - Patiënten met CPE, Clostridium difficile infecties, Gastro-enteritis. - Patiënten met het Noro of Corona virus. - Patiënten die radiotherapie of chemotherapie ondergaan. - In het ziekenhuis: Oncologische dagbehandeling, Urologie (bij onderzoeken), pre en post operatief, SEH, geriatrie etc.
Hoe te gebruiken	1. Open de doos en neem een zak eruit. 2. Vouw de zak open, plaats de inlegger onderin de zak en rol de zak op zodat deze door de hals van de houder past. 3. Plaats de opgerolde zak door de hals van de houder, de zak zal zich in de onderkant van de houder uitrollen. Indien noodzakelijk herpositioneer de inlegger door via de achterzijde van de houder de inlegger te verplaatsen. 4. Plaats de zak over de hals van de houder met de touwtjes aan beide zijanten. Plaats de touwtjes kruislings achter het bevestigingspunt gevestigd op de hals van de houder. Trek via de achterzijde van de houder de zak strak zodat de touwtjes strak om het bevestigingspunt op de hals zitten (Bij sticktest/bemonsteren voor kweek de inlegger achteraf toevoegen). Advies: maximaal 1 extra inlegger plaatsen om de opnamecapaciteit te verhogen, standaard opname 450 ml, maximale opname 900 ml (2 inleggers). 5. Urineer in de zak. 6. Wacht enige tijd totdat de inlegger in gel is veranderd. 7. Maak de zak los van de houder (touwtjes losmaken en de zak aan de onderzijde eruit halen). 8. Sluit de zak door aan de treksluiting te trekken en knoop de zak dicht zowel bovenop de zak als nog met een extra knoop om de hals van de zak. 9. Gooi de zak weg bij het restafval of volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling. 10. Na het verwijderen van de gebruikte zak de houder huishoudelijk reinigen, eventueel desinfecteren bij zichtbare verontreiniging en een nieuwe zak in de houder plaatsen zodat deze weer klaar is voor volgend gebruik. 11. Plaats de houder terug op de plek waar deze normaal ligt of hangt. 12. Gooi de houder weg: - als, ondanks (herhaalde) handmatige reiniging en desinfectie, de houder zichtbaar verontreinigd blijft of kalkaanslag bevat, of de houder beschadigd is; - bij het opheffen van de cliëntgebonden status.
Voorzorgsmaatregelen	Pas handhygiëne toe en draag handschoenen. Draag bij voorkeur een halterschort. Draag een jasschort met lange mouw bij infecties als BRMO, Corona etc. (conform de richtlijnen).

Gebruiksaanwijzing

1



Neem de zak en plaats de inlegger onderin de zak, rol de zak op en doe de zak via de hals in de houder.

2



Vouw de uiteinden van de zak om de hals van de houder. Fixeer de zak aan de houder (de touwtjes kruislings om het bevestigingspunt op de hals plaatsen).

3



Urineer in de zak.

4



Haal de zak uit de houder en knoop de zak dicht, bij voorkeur met een dubbele knoop. Gooi deze weg bij het restafval of volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling.

NIET DOOR HET TOILET SPOELEN

5



Desinfecteer de handen conform de richtlijnen.

LRQA

Certified
ISO 13485

Exclusief gedistribueerd door:

OmniMedical

Weverstraat 28 | 4061 AP Ophemert

Tel.: 0344 65 14 44

info@omnimedical.nl | www.omnimedical.nl



OmniMedical
the WISH company

Versie: 030823